


Nova Embalagem

Instrução para colocação com chave motor



Embalagem com duplo lacre para maior segurança.

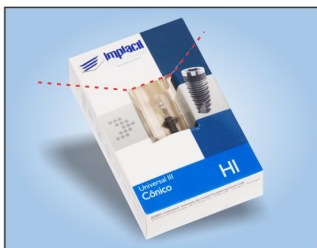

Abra a embalagem externa rompendo o serrilhado.



Retire o blister da embalagem externa.




Atenção:
Não abra o blister até o momento da inserção.




Abra a blister pela aba lateral e retire a cápsula




Remova a tampa da cápsula para acesso ao implante.

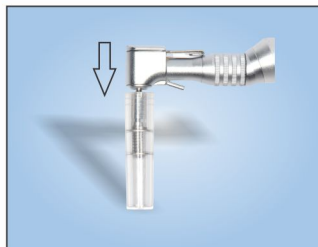


Capture o implante com a chave motor, se necessário gire a embalagem para melhor adaptação. Certifique-se do encaixe perfeito entre implante e chave para que não ocorra a queda.

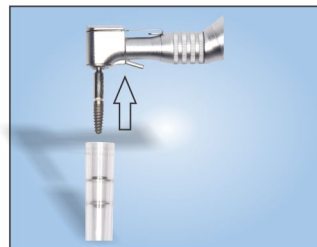

Remova o implante da embalagem com movimento vertical, assim poderá transportar o implante para o leito cirúrgico e realizar a instalação com a chave motor.

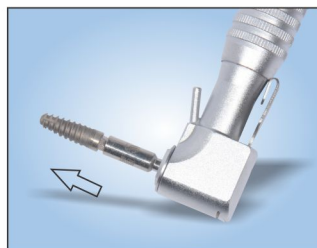

Esta deve ser a inclinação ideal para o transporte do implante ao leito cirúrgico.

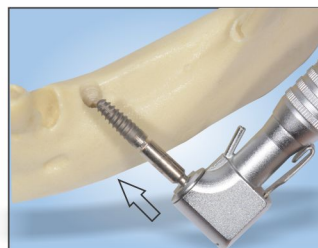


O Cover (Tapa Implante) encontra-se na cavidade interna da tampa da cápsula. Puxe a tampa superior, ele servirá para o transporte do Cover até o implante.

Instruções de uso acesso: www.implacildebortoli.com.br

Nova Embalagem

Instrução para colocação com chave catraca

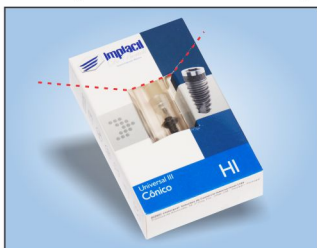

Embalagem com duplo lacre para maior segurança.



Abra a embalagem externa rompendo o serrilhado.



Retire o blister da embalagem externa.



Atenção:
Não abra o blister até o momento da inserção.



Abra a blister pela aba lateral e retire a cápsula




Remova a tampa da cápsula para acesso ao implante.




Capture o implante com a chave catraca, se necessário gire a embalagem para melhor adaptação. Certifique-se do encaixe perfeito entre implante e chave para que não ocorra a queda.



Remova o implante da embalagem com movimento vertical, assim poderá transportar o implante para o leito cirúrgico e realizar a instalação com a chave motor.

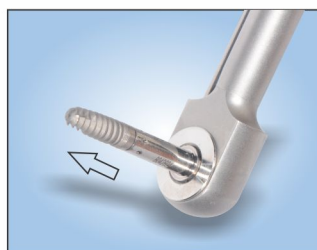

Esta deve ser a inclinação ideal para o transporte do implante ao leito cirúrgico.

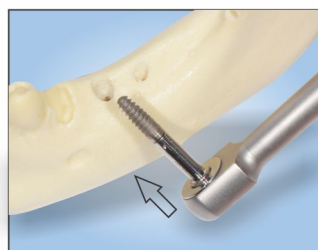

O Cover (Tapa Implante) encontra-se na cavidade interna da tampa da cápsula. Puxe a tampa superior, ele servirá para o transporte do Cover até o implante.

Instruções de uso acesso: www.implacildebortoli.com.br